

Behandeling van een ulcera gelokaliseerd op het rechter scheenbeen met Drawtex.

+ Voorgeschiedenis

Patiënt, 86 jaar

Dhr (86 jaar) heeft sinds december 2015 ulcera op zijn rechter onderbeen ten gevolge van een trauma. Dhr was uitgegleden op de stoep en uiteindelijk met zijn been in een rozenstruik terecht gekomen waardoor enkele doorns zich in het dieper gelegen weefsel doordrongen. Echter bleek er stagnatie te zijn van de wondgenezing, ondanks ambulante compressie therapie. Dhr is bekend met hartfalen en psoriasis. Heeft ondanks de leeftijd nog een actief sociaal leven. In april werd dhr doorverwezen naar een wondcentrum, alwaar gestart werd met Drawtex.



10-04-2016 start met drawtex icm absorberend verband en ambulante compressie therapie

- T** Granulerende wond met grotendeels ook fibrineusbeslag
- I** Geen klinische tekenen van infectie aanwezig
- M** Matig exsudaat aanwezig
- E** Iets verheven ondermijnde wondranden



11-05-2016

- T** Granulerende wond
- I** Geen klinische tekenen van infectie aanwezig
- M** Weinig exsudaat
- E** Gladde wondranden zonder ondermijning



11-06-2016

- T** Granulerende wond
- I** Geen klinische tekenen van infectie aanwezig
- M** Weinig exsudaat
- E** Gladde wondranden



06-07-2016

- T** Volledig gesloten wond
- I** Geen klinische tekenen van infectie aanwezig
- M** Weinig exsudaat
- E** Wondranden gesloten