

Behandeling van Ulcus Cruris met ActiMaris® Forte/Sensitive wondirrigatie oplossing en ActiMaris® wondgel.



+ Voorgeschiedenis

Patiënt, 88 Jaar

Dhr. is 88 jaar en woont in een woon- en zorgcentra.

Dhr. is vanaf 2015 bekend met veneus vaatlijden.

Voorgeschiedenis: CVA, Obesitas, Diabetes type 2, Decompensatio cordis, hypertensie, nierfunctiestoornissen en nierinsufficiëntie.

Diagnostiek is gedaan door de vaatchirurg van het Lange Landziekenhuis.

Dhr. heeft een EAI van 0,85 en wordt behandeld met compressie therapie.

- A** Ulcus Cruris
- L** Linker onderbeen Laterale zijde
- T** Gedurende bijna 5 jaar met ups en downs
- I** (November 2019) 10 x 8 cm oppervlakkig
- S** Veneus vaatlijden, hypertensie, diabetes type 2, Obesitas, CVA, nierfunctiestoornis en nierinsufficiëntie, decompensatio cordis



02-09-19: Benen worden gewassen met kraanwater vervolgens wordt er gaas gedrenkt in Azijn zuur (3%) voor 10 minuten op de wond aangebracht. De huid wordt gedroogd en er wordt een hydrogel op de wond aangebracht. De omliggende huid wordt ingesmeerd met Dermovate crème. De aangedane huid wordt afgedekt met vet gaas en een absorberend verband. Compressie : Klittenband systeem

- T** 100% geel / groen
- I** ja, echter is er geen sprake van roodheid of koorts
- M** groen wondvocht / nat
- E** verweekt



07-11-19: Benen worden gewassen met kraanwater vervolgens wordt er gaas gedrenkt in Azijn zuur (3%) voor 10 minuten op de wond aangebracht. De huid wordt gedroogd. De omliggende huid wordt ingesmeerd met Dermovate crème. De aangedane huid wordt afgedekt met een antimicrobieel gaas en een absorberend verband.

- T** 50% zwart 40% geel 10% rood.. maar heel groot deel huid verweekt en oppervlakkig ontveld
- I** ja, echter is er geen sprake van roodheid of koorts
- M** Nat groen wond vocht
- E** verweekt

Behandeling van Ulcus Cruris met ActiMaris® Forte/Sensitive wondirrigatie oplossing en ActiMaris® wondgel.



+ Voorgeschiedenis

Patiënt, 88 Jaar



26-11-19: Benen worden gewassen met kraanwater vervolgens wordt er gaas gedrenkt in ActiMaris® Forte wondirrigatie oplossing voor 5 minuten op de wond aangebracht.
De huid wordt gedroogd. De ActiMaris® wondgel wordt op de aangedane huid aangebracht en deze wordt afgedekt met een absorberend verband. Compressie : Klittenband systeem

- T** 80 groen/ zwart 10 geel 10% rood.
I ja, echter is er geen sprake van roodheid of koorts
M Nat groen wond vocht
E verweekt



19-12-19: Benen worden gewassen met kraanwater vervolgens wordt er gaas gedrenkt in ActiMaris® Forte wondirrigatie oplossing voor 5 minuten op de wond aangebracht.
De huid wordt gedroogd. De ActiMaris® wondgel wordt op de aangedane huid aangebracht en op de omliggende huid wordt Dermovate crème aangebracht. De aangedane huid wordt afgedekt met een antimicrobieel gaas en een absorberend verband. Compressie : Klittenband systeem

- T** 50% geel 50% rood.
I nee
M Nat
E Licht verweekt, verbetering zichtbaar
(Vanaf 05-12-19 is groen beslag weg)



27-01-20: Benen worden gewassen met kraanwater vervolgens wordt er gaas gedrenkt in ActiMaris® Sensitive wondirrigatie oplossing voor 5 minuten op de wond aangebracht.
De huid wordt gedroogd. De ActiMaris® wondgel wordt op de aangedane huid aangebracht en op de omliggende huid wordt Dermovate crème aangebracht. De aangedane huid wordt afgedekt met absorberend verband. Compressie : Klittenband systeem

- T** 25% zwart 25% geel 80% rood.
I nee
M vochtig
E intact