



Naam	Formaat	Verpakking	Productcode	Z-Index
DRAWTEX® Hydroconductive Wound Dressing	5x5cm	10st	D0505	16288475
DRAWTEX® Hydroconductive Wound Dressing	7,5x7,5cm	10st	D7575	16288483
DRAWTEX® Hydroconductive Wound Dressing	10x10cm	10st	D1010	16288505
DRAWTEX® Hydroconductive Wound Dressing	15x20cm	10st	D1520	16288521
DRAWTEX® Hydroconductive Wound Dressing	20x20cm	10st	D2020	16288556
DRAWTEX® Hydroconductive Wound Dressing	6cm rond Tracheostomy	10st	DT0606	16361113
DRAWTEX® Hydroconductive Wound Dressing	10x10cm Tracheostomy	10st	DT1010	16288572
DRAWTEX® Hydroconductive Wound Dressing	7,5cmx1m rol	5st	R175	16288599
DRAWTEX® Hydroconductive Wound Dressing	10cmx1m rol	5st	R101	16288602
DRAWTEX® Hydroconductive Wound Dressing	20cmx1m rol	5st	R201	16288696
DRAWTEX® Hydroconductive Wound Dressing	46cmx1m rol	10st	DP0146	16361091
ActiMaris® Wondgel		20G	30220	16781066
ActiMaris® Sensitive oplossing voor wond irrigatie		300ML	30300	16781074
ActiMaris® Sensitive oplossing voor wond irrigatie		1000ML	31000	16782119
ActiMaris® Forte oplossing voor wond irrigatie		300ML	30350	16781082

ActiMaris®

Wondrigatie oplossing en wondgel voor het reinigen, bevochtigen, ontsmetten, behandelen van biofilm, verminderen van zwelling en een fysiologisch debrideert om een optimale micro-omgeving in de wond te creëren.

WONDASPECT	DOEL	PRODUCTEN	TOEPASSING
Zwarte wond			
Nat/vochtig	Wondreiniging Geurvermindering Necrose oplossen en verwijderen Creëren optimaal vochtig wondmilieu	ActiMaris® Forte ActiMaris® Sensitive ActiMaris® Wondgel	1. Doordrenk de gazen met ActiMaris® Forte of ActiMaris® Sensitive. - ActiMaris® Forte 5-10 minuten laten inwerken. - ActiMaris® Sensitive 10-15 minuten laten inwerken. 2. Droogdeppen 3. Aanbrengen van ActiMaris® Wondgel en afdekken met een verband naar keuze
Gele wond			
Nat/vochtig	Wondreiniging Geurvermindering Fibrine beslag oplossen en verwijderen Creëren optimaal vochtig wondmilieu	ActiMaris® Forte ActiMaris® Sensitive ActiMaris® Wondgel	1. Doordrenk de gazen met ActiMaris® Forte of ActiMaris® Sensitive. - ActiMaris® Forte 5-10 minuten laten inwerken. - ActiMaris® Sensitive 10-15 minuten laten inwerken. 2. Droogdeppen 3. Aanbrengen van ActiMaris® Wondgel en afdekken met een verband naar keuze
Rode wond			
Nat/vochtig	Wondreiniging Geurvermindering Bescherming en stimuleren van granulatieweefsel Creëren optimaal vochtig wondmilieu	ActiMaris® Sensitive ActiMaris® Wondgel	1. Doordrenk de gazen met ActiMaris® Forte of ActiMaris® Sensitive. - ActiMaris® Forte 5-10 minuten laten inwerken. - ActiMaris® Sensitive 10-15 minuten laten inwerken. 2. Droogdeppen 3. Aanbrengen van ActiMaris® Wondgel en afdekken met een verband naar keuze
Droog	Wondreiniging Bescherming en stimuleren van granulatieweefsel Creëren optimaal vochtig wondmilieu	ActiMaris® Wondgel	Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing. Aanbrengen van ActiMaris® Wondgel en afdekken met een verband naar keuze

ActiMaris® oplossing en gel aanbrengen bij kamertemperatuur. ActiMaris® Forte kan naast op de wond ook gebruikt worden op de ActiMaris® Wondgel. Het is niet aan te raden de wond te behandelen met ActiMaris® Wondgel op de ActiMaris® Wondgel. Bij klinische tekens van infectie overleg met hoofdbehandelaar/arts voor een passende antibacteriële en/of farmacotherapeutische therapie. Voorkom maceratie en draag zorg voor een frequente verbandwissel passende bij de mate van exsudaat en de fase van de wond. Pas indien nodig compressietherapie toe.

Gebruiksduur afstemmen op de individuele wondomstandigheden. Draag zorg voor multidisciplinaire afstemming met andere zorgprofessionals passende bij het soort/type wond. Indien er na 3 weken geen duidelijke verbetering zichtbaar is overleg met hoofdbehandelaar/arts.

Drawtex®

Hydroconductorie wondverband om exsudaat, debris, bacteriën en schadelijke MMP's uit het wondbed te verwijderen

WONDASPECT	DOEL	PRODUCTEN	TOEPASSING
Zwarte wond			
Nat/vochtig	Wondreiniging Necrose oplossen en verwijderen Creëren optimaal vochtig wondmilieu	Drawtex®	Reinig de wond met ActiMaris® Sensitive of ActiMaris® Forte Indien nodig knipt u Drawtex® op maat Bij diepe wonden brengt u eerst een laag Drawtex® aan binnen de wondranden, u kunt daarna een tweede laag Drawtex® aanbrengen. Bij oppervlakkige wonden brengt u de Drawtex® over de wondranden aan Dek Drawtex® daarna af met een secundair verband naar keuze
Gele wond			
Nat/vochtig	Wondreiniging Geurvermindering Fibrine beslag oplossen en verwijderen Creëren optimaal vochtig wondmilieu	Drawtex®	Reinig de wond met ActiMaris® Sensitive of ActiMaris® Forte Indien nodig knipt u Drawtex® op maat Bij diepe wonden brengt u eerst een laag Drawtex® aan binnen de wondranden, u kunt daarna een tweede laag Drawtex® aanbrengen. Bij oppervlakkige wonden brengt u de Drawtex® over de wondranden aan Dek Drawtex® daarna af met een secundair verband naar keuze
Rode wond			
Nat/vochtig	Wondreiniging Geurvermindering Bescherming en stimuleren van granulatieweefsel Creëren optimaal vochtig wondmilieu	Drawtex®	Reinig de wond met ActiMaris® Sensitive of ActiMaris® Forte Indien nodig knipt u Drawtex® op maat Bij diepe wonden brengt u eerst een laag Drawtex® aan binnen de wondranden, u kunt daarna een tweede laag Drawtex® aanbrengen. Bij oppervlakkige wonden brengt u de Drawtex® over de wondranden aan Dek Drawtex® daarna af met een secundair verband naar keuze

Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing
Niet gebruiken bij arteriële bloedingen

Breng bij licht exsuderende wonden of magneet droge wonden eerst een niet-klevend geperforeerd wondcontactlaag aan alvorens Drawtex® aan te brengen
Bij klinische tekens van infectie overleg met hoofdbehandelaar/arts voor een passende antibacteriële en/of farmacotherapeutische therapie

Voorkom maceratie en draag zorg voor een frequente verbandwissel passende bij de mate van exsudaat en de fase van de wond

Pas indien nodig compressietherapie toe

Gebruiksduur afstemmen op de individuele wondomstandigheden

Draag zorg voor multidisciplinaire afstemming met andere zorgprofessionals passende bij het soort/type wond

Indien er na 3 weken geen duidelijke verbetering zichtbaar is overleg met hoofdbehandelaar/arts