

Ralph **Smeets** (We Medical):

‘**WONDZORG** kan met standaardproducten *beter* en *efficiënter* worden’

Bijna vier jaar geleden startte **Ralph Smeets** met zijn bedrijf **We Medical** in de wondzorg. Vier jaar later heeft zijn bedrijf zich vooral op het gebied van stomazorg in binnen- en vooral buitenland een goede naam verworven. En de wondzorg?

Met een standaardproduct voor wondbedpreparatie van het Zuid-Afrikaanse *Drawtex* gaat het bedrijf opnieuw proberen ook in de wondzorg een stevige voet aan de grond te krijgen. Met dezelfde, opmerkelijk consistentie, filosofie, als waarmee het bedrijf vier jaar geleden is begonnen.

Ralph Smeets: ‘Wij geloven dat veel wonden prima met standaardproducten zijn te behandelen. Dat is veel beter en zeker efficiënter. Met *Drawtex* gaan we een dergelijk product voor een optimale wondbedpreparatie op de markt brengen.’



» **E**en goede wondbedpreparatie is een noodzaak voor een goede behandeling van iedere wond. Die preparatie brengt immers het natuurlijke genezingsproces op gang en versnelt dat proces. En de wondbedpreparatie

kan natuurlijk ook een prima basis leggen voor een andere therapeutische behandeling van de wond.

Ralph Smeets: ‘Een goede wondbedpreparatie is onontbeerlijk voor een goed genezingsproces. Wij willen patiënten en behandelaars kwalita-

tief hoogwaardige producten bieden die de zorg betaalbaar en effectief maken. Een snelle genezing van de wond valt of staat met een goede preparatie van het wondbed. *Drawtex* past precies binnen deze filosofie en wij zijn er van overtuigd »

» dat dit product in de eerste en de tweede lijn het vertrekpunt kan zijn voor een goede behandeling van de wond.'

Hydroconductief

Drawtex is een capillair, hydroconductief verband. De capillairen zorgen ervoor dat exsudaat en debris uit de wond worden opgenomen in het poreuze verbandmateriaal. De kleine poriën werken als capillairen en door de intermoleculaire aantrekkingskracht tussen het exsudaat en de vaste oppervlakken van het wondverband wordt het exsudaat opgezogen, tegen de zwaartekracht in. De bij de productie van het verband gebruikte LevaFiber™ technologie zorgt ervoor dat het exsudaat zowel verticaal als horizontaal wordt opgezogen, vastgehouden en afgevoerd door het verband. Maar *Drawtex* is ook een elektrostatisch verband. Zodra het negatief geladen verband in contact komt met het exsudaat ontstaat er een elektrostatische werking. Ionen in het exsudaat vormen een beweeglijke laag met een tegengestelde lading, een zogenaamde elektrochemische dubbell laag, waardoor de lading op het verbandoppervlak in feite wordt omgekeerd en positief wordt. Hierdoor wordt een relatief groot deel van het exsudaat, dood weefsel, bacteriën en schadelijke chemische stoffen in het verband opgenomen. **Ralph Smeets:** 'De combinatie van deze eigenschappen maak het product echt uniek. En kijken naar de indicaties kan ik ook nog zeggen dat dit verband bij een breed scala aan wonden kan worden ingezet. De fabrikant beschikt bovendien over een uitgebreide hoeveelheid klinische data om deze claim te ondersteunen.'

Voordelen

Ralph Smeets somt tot slot nog in hoog tempo een aantal voordelen van het *Drawtex* verband op. 'Het verband beheert en reguleert overmatig exsudaat in de wond, maar het is natuurlijk veel meer dan alleen een absorberend verband. Het vergemakkelijkt de verwijdering van debris uit de wond. Het onttrekt klevend fibrine en dood weefsel aan de wond, terwijl tegelijkertijd gezond granulatiweefsel intact wordt gehouden. *Drawtex* trekt bovendien MMP's uit het wondbed en neemt die op in het verband. Dit zijn stuk voor stuk voordelen die er met elkaar

Ralph Smeets:

'Een goede wondbedpreparatie is onontbeerlijk voor een goed genezingsproces'



voor zorgen dat dit een uitstekend algemeen en breed toepasbaar product voor wondbedpreparatie is.' Het verband kan worden geknipt naar de vorm van de wond en kan op alle zijden op de wond worden aangebracht. Het bedrijf geeft aan dat bij droge of licht exsuderende wonden eerst een niet-verklevend verband moet worden gebruikt voordat de *Drawtex* zo wordt aangebracht dat er direct contact is met het wondbed. Bij matig tot sterk exsuderende wonden kan het verband rechtstreeks op de wond worden aangebracht. Bij heel sterk exsuderende wonden kunnen zo nodig extra lagen worden gebruikt. Het geheel kan worden afgedekt met een secundair verband naar eigen keuze. **Ralph Smeets:** 'Drawtex is een gebruiksvriendelijk standaardproduct dat aanzienlijke voordelen biedt voor patiënten en behandelaars. Wij zijn er van overtuigd dat het zijn weg naar de Nederlandse markt gaat vinden.' ■

Stomazorg

We Medical brengt ook een uitgebreid pakket voor stomazorg op de markt en is daar zeker in het buitenland heel succesvol mee. **We Peel** is een product voor het snel en pijnloos verwijderen van stomazakjes, huidplaten en flenzen. **We Film** is een soort extra huidlaag die er voor zorgt dat de huid minder snel loslaat bij het verwijderen van stomazakjes en **We Absorb** is een oplosbaar sachet dat de inhoud van een stomazakje in een hanteerbare gel verandert. Daarnaast heeft het bedrijf ook **Hydro pastaringen** en grote **Hydro hechtstrippen** in haar assortiment opgenomen.